



Saners

Limpiador y desinfectante
Manual de usuario

MODELO-DB1

V1.0.3

www.air360.es

Muchas gracias por adquirir esta máquina desinfectante. Nos complace anunciar que estamos comprometidos a proporcionarle innovación y métodos de seguridad que mejorarán su salud y bienestar. Esta máquina esterilizadora posee luz ultravioleta testada que mata gérmenes, bacterias y otros patógenos.

Puede desinfectar su máquina del sueño tanto la máscara como el tubo sin ningún problema.

El proceso de esterilización no requiere agua jabonosa o cualquier otro líquido. Para más dudas y cuestiones, siéntase libre de ponerse en contacto con nosotros.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD


PELIGRO

- Mientras se esté usando, cierre la cubierta superior y no deje que la luz ultravioleta irradie directamente sobre la piel o los ojos
- No limpiar con agua, puede usar toallitas para quitar la suciedad pero debe evitar que el agua toque la lámpara.
- Mantener alejado del fuego y de fuentes de calor
- No acerque imanes al producto
- Mantener alejado del alcance de los niños ¡No es un juguete!


ADVERTENCIA

- Antes de usarlo, asegurese de que ha retirado todos los materiales de embalaje. Revise también que no hayan daños visibles en el producto y/o accesorio. Si tiene cualquier duda, no use la máquina y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- No desmonte la unidad
- El diseño de este dispositivo está pensado para la desinfección más óptima
- Para garantizar el correcto funcionamiento, lea detenidamente este manual.


EN LA CAJA ENCONTRARÁ

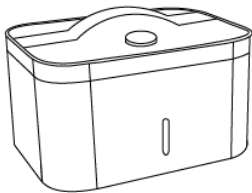

1 x Limpiador

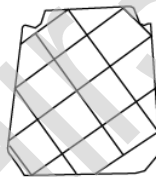

1 x Estante


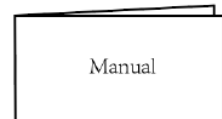


1 x Manual

INTRODUCCIÓN




Cable USB (entrada 5V/1A)

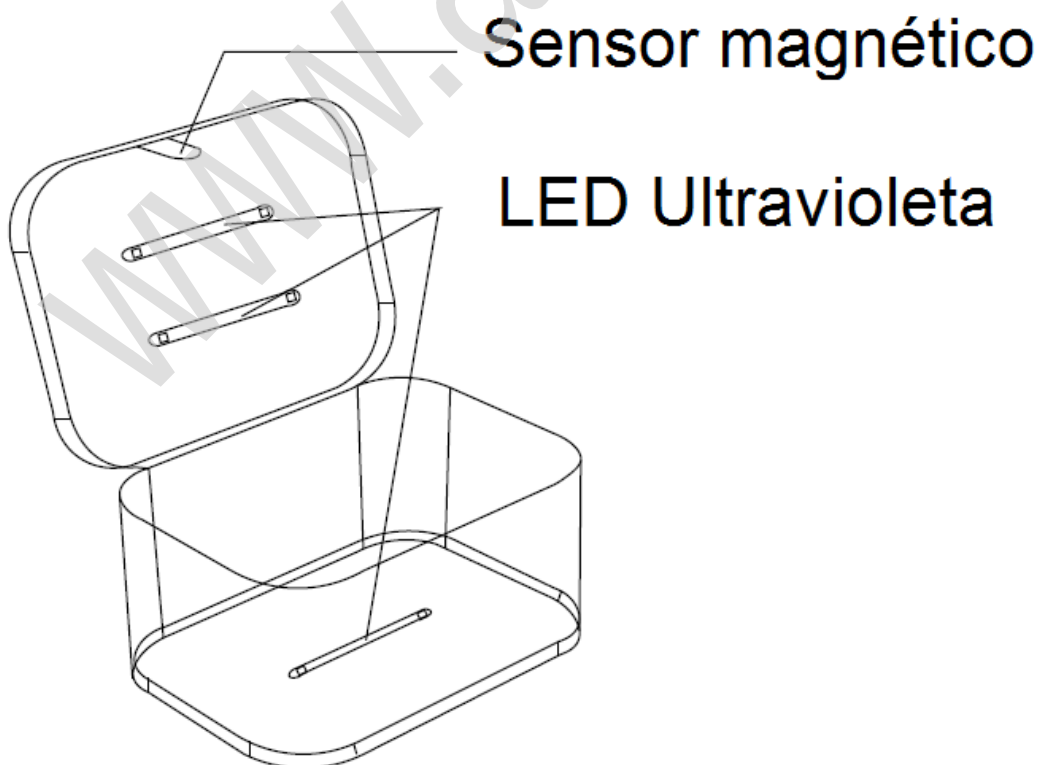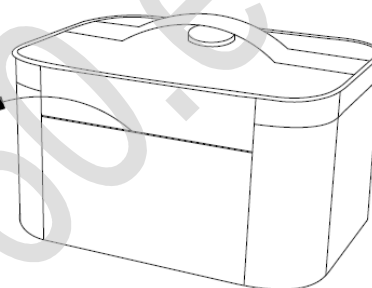


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


- Abra la tapa y coloque el estante

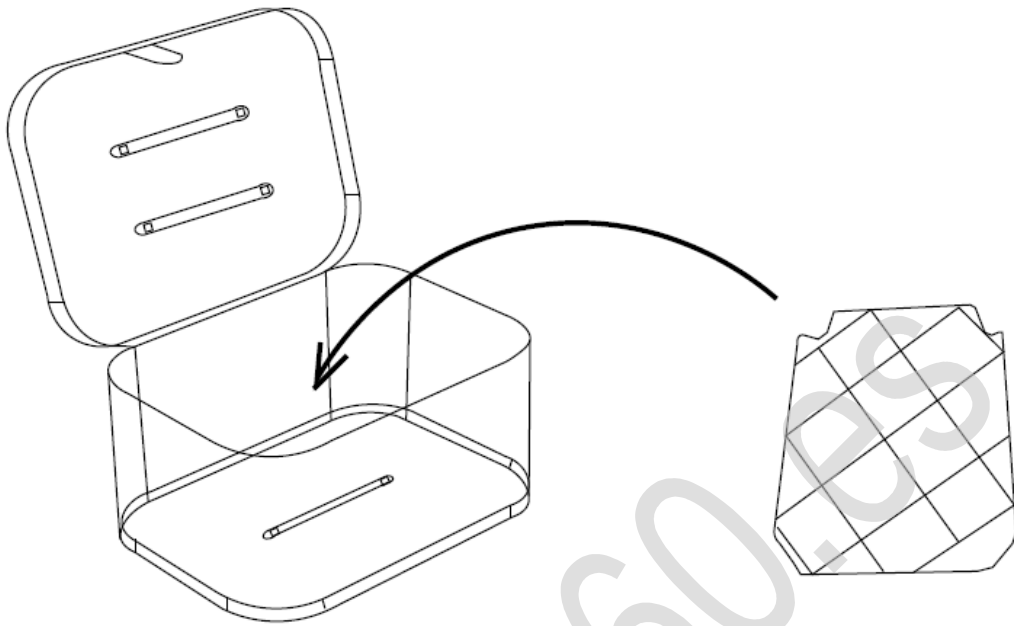


- Introduzca los objetos que desea desinfectar

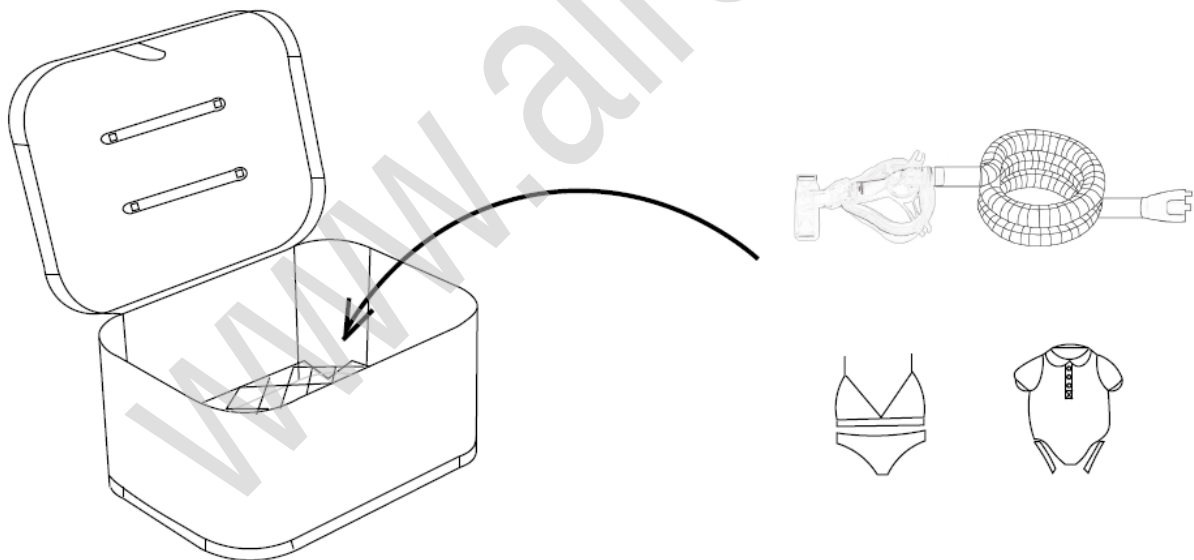

- Cierre la tapa y asegúrese de que el imán está sujeto. Conecte el cable USB al cargador

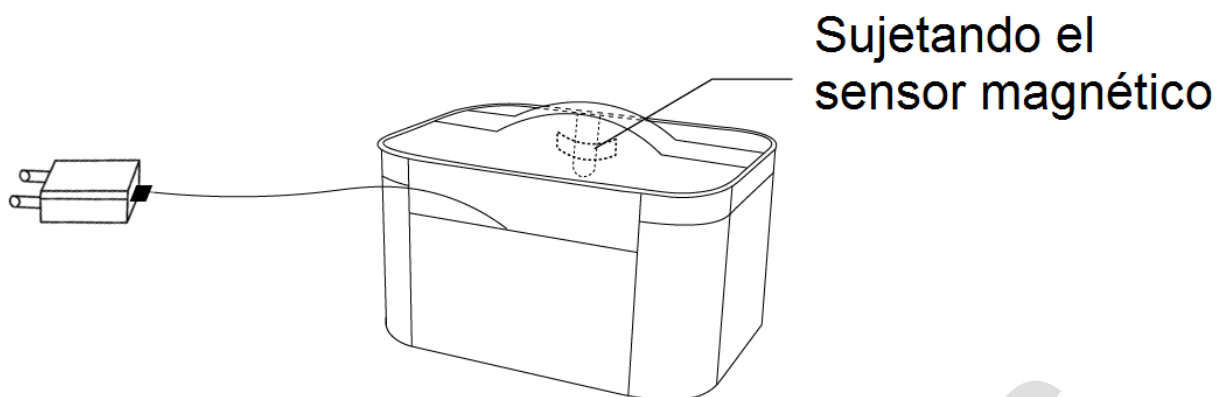

- Pulse el botón, el indicador brillará al empezar la desinfección de sus objetos. Podrá ver una luz morada a través de la ventana

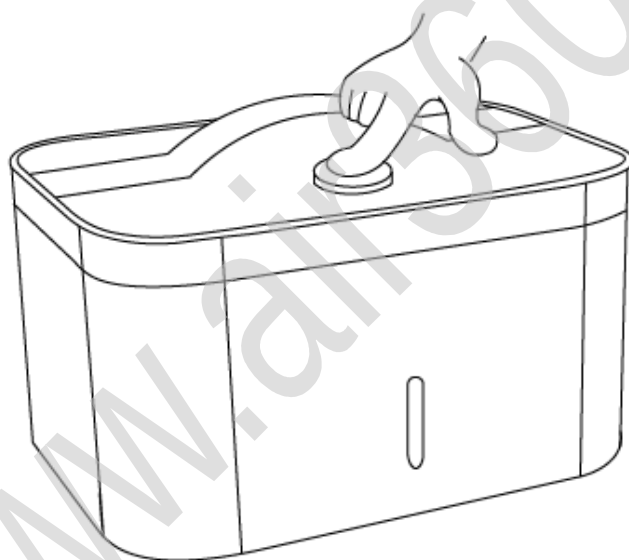

- Pasados 3 minutos, la máquina terminará la desinfección automáticamente. Si necesita detener el proceso manualmente, desconecte primero el cable USB

MEDIDA DE SEGURIDAD

- Este producto cuenta con un diseño orientado a la seguridad. No empezará el proceso si no cierra la tapa y el imán no está fijado. También se detendrá la desinfección automáticamente si abre la tapa.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Estado	Indicador
Desinfectando	Encendido
Desinfección completada	Apagado
Desinfección detenida	Parpadeo
Encendido	Parpadeo

TÉCNICO

- Entrada 5V/1A
- Longitud de onda de la luz ultravioleta: 270-280 nm
- Vida útil de la lámpara: 10000 horas



<https://www.facebook.com/Air360-102513701494985>



<https://www.instagram.com/air360es/>

Información comercial y pedidos:

Air 360 y Hogar S.L.
C/ Polonia nº12 H
12006 - Castellón